



Jeder Penis ist einzigartig. In Länge, Dicke und Form. My.Size Kondome aus hoch anpassungsfähigem Latex gibt es in sechs verschiedenen Grössen.

My.Size Nr.	1	2	3	4	5	6
Penisumfang	7.5 bis 8.8	8.9 bis 10.2	10.3 bis 11.7	11.8 bis 13.2	13.3 bis 14.7	14.8 bis 16.2
Penislänge	5 bis 14	7 bis 15	10 bis 17	10 bis 17	12 bis 19	13 bis 22

Welches Kondom zu welchem Penis passt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Nicht nur die Anatomie ist von Mann zu Mann unterschiedlich, auch das Gefühlsempfinden. Die einen mögen's bequemer, andere finden, ein engeres Kondom verstärke den Orgasmus. Im Zweifelsfall verschiedene Grössen ausprobieren. Bis es perfekt sitzt.

Die Länge

Die Länge kann man bei Bedarf regulieren, indem man das Kondom mehr oder eben weniger abrollt. Sitzt es in der Breite perfekt, ist das kein Problem.

Die Breite

Entscheidend, wie wohl sich ein Mann mit seinem Kondom fühlt, ist die Breite. Es sollte nicht wegrutschen, aber auch nicht einengen. Sitzt es perfekt, bemerkt man es kaum noch.

Die richtige Grösse

Kondomgrössen werden mit dem Penisdurchmesser in Millimetern angegeben. Der lässt sich einfach berechnen. Auf der Internetseite www.praeser.ch/mysize, gibt es einen Messstreifen aus Papier zum Ausdrucken und Ausschneiden. Damit wird Länge und Umfang des Penis ermittelt. Mathematikfreunde errechnen den Durchmesser im Kopf, alle anderen tippen die Zahlen in den Umrechner auf der Website ein und ermitteln so den Durchmesser. Damit lässt sich spielend leicht die richtige Kondomgrösse finden.

Tragkomfort

My.Size Kondome gibt es in sechs verschiedenen Grössen. Die Kondome sind qualitätsgeprüft und bieten ein sicheres und natürliches Gefühl. Das Feedback unserer Kunden bestätigt uns immer wieder: Der Tragkomfort und die Gefühlsintensität von My.Size sind fantastisch.

Sicherheit

Die richtige Grösse gibt dem Anwender Sicherheit. Sowohl was Schwangerschaftsverhütung betrifft, als auch den Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Weil das Kondom richtig sitzt, muss man es nicht ständig überprüfen und kann sich ganz auf den Partner konzentrieren.

Gefühl

Die Kondombreite hat entscheidenden Einfluss auf das Empfinden des Mannes. Vergleichbar ist das mit zu grossen oder zu kleinen Schuhen: mit beiden kann man zwar notfalls durch die Stadt laufen, aber angenehm ist das nicht. Man stolpert ständig oder leidet Höllenqualen. Das muss wirklich nicht sein.

Anwendung

Das Abrollen von My.Size Kondomen geht im Vergleich zu anderen Präservativen leichter, weil sich durch die passende Kondombreite Kraftaufwand merklich reduziert.

Qualität

Alle My.Size Kondome werden nach der EN ISO 4074:2002 hergestellt und produziert. Die Kondome tragen eine CE-Kennzeichnung. Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001.

Pressekontakt:
Entry GmbH
Claudia Jasiello
Tel. 044 310 13 05
cjasiello@praeser.ch

