

# My.Size Massband



Finde dein perfektes Kondom. Eines, das nicht abrutscht, nicht einengt und nicht stört beim Sex – und dir optimale Sicherheit garantiert.

Mit dem Massstreifen geht das ganz einfach.

## Schritt 1: Ausdrucken

Den Massstreifen auf einem A4-Blatt ausdrucken und mit einer Schere den gepunkteten Linien entlang ausschneiden.

## Schritt 2: Länge

Bring den Penis in einen stark erigierten Zustand. Dann legst du das Massband auf den Penischaft. Und zwar oben, möglichst nahe am Schambein. Wenn nötig, schieb die Schamhaare etwas zur Seite. Der Längsstreifen des Massbandes liegt nun auf deinem Penis und du kannst die Länge ablesen.

## Schritt 3: Umfang

Lege nun das vorstehende Ende des Papierstreifens um deinen Penis, um die Dicke zu messen. Achte darauf, dass das Massband zwar eng um deinen Penischaft liegt, aber nicht drückt oder quetscht. Einfach so um den Penis wickeln, dass der Papierstreifen zwar satt, aber bequem sitzt. Nun kannst du den Penisumfang in Zentimetern ablesen. Diese Zahl ist der Umfang.

## Schritt 4: Umrechner

Rufe die Seite [www.praeser.ch/mysize](http://www.praeser.ch/mysize) auf. Hier kannst du Länge und Umfang eingeben, die du in Schritt 2 und 3 gemessen hast. Der Umrechner ermittelt damit, welche My.Size Grösse für dich die Richtige ist.

Wichtig ist, dass ein Kondom weder abrutschen kann, noch einengt. Vielleicht musst du zwei verschiedene Grössen ausprobieren, um das perfekt Passende für dich zu finden. Entscheidend ist, dass du dich wohl fühlst mit deinem Kondom.

Bitte beachte die scharfen Papierkanten, die beim Ausschneiden entstehen können, wenn du das Massband benutzt.

Umfang

Länge

Ansatzlinie